


Needle Fix - 8102 Pansement pour fixation de cathlons

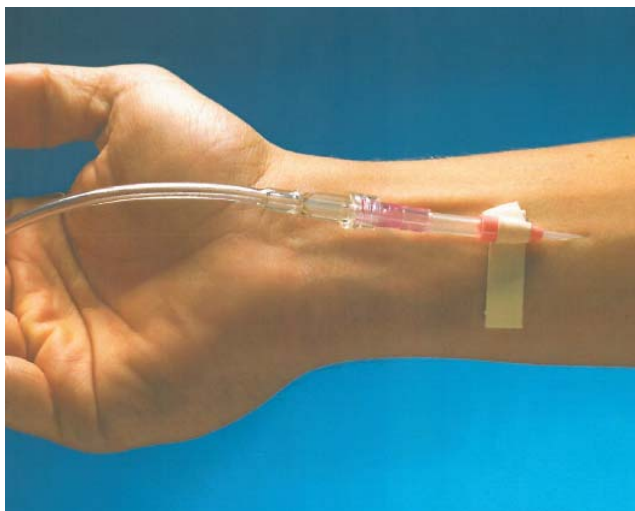

- ♥ Efficace et sûr pour 12 heures
- ♥ Simple et rapide à poser
- ♥ Retrait facile
- ♥ Adhésif non allergénique
- ♥ Très confortable pour le patient
- ♥ Bon marché



Référence : 8102

Boîte de 20 sachets de 100 fixations

Usage Unique

Pose en deux étapes :

1. Retirer le protecteur de la partie la plus grande et l'appliquer sur la peau sous le cathlon. Laisser la petite portion de protecteur qui sera utilisée lors du retrait.
2. Retire le protecteur siliconé du côté supérieur et placer le cathlon sur l'adhésif à la jonction entre la partie inférieure et la partie supérieure. Fixer sur la peau en passant par-dessus le cathlon.

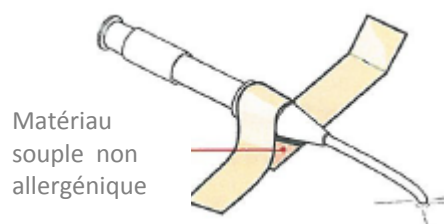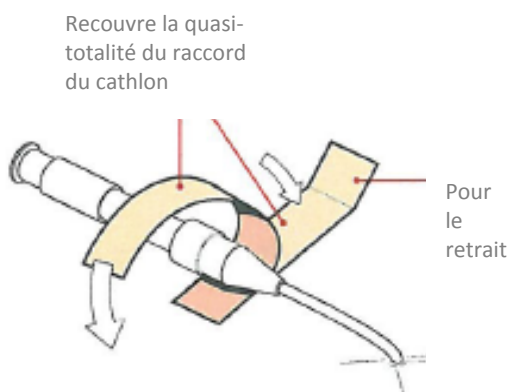

**Bernas Médical, 55 rue Stéphenson
75018 PARIS
01 53 41 41 42**

dimed@bernas-medical.com ;
www.bernas-medical.fr

Copenhagen MedLap CML ApS

DK 2600 Glostrup

www.copenhagen-medlab.com